




**INTACT BODY**

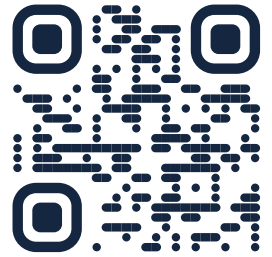

[intactbody.hu](https://intactbody.hu)

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A talpbetét javasolt kihordási ideje 1 év.

Távolítsa el cipőjéből a meglévő talpbetétet és helyezze bele az új Intact Body-s talpbetétet.

A talpbetéteket a talpára gyártjuk, nem a cipőjébe, így előfordulhat, hogy nem illeszkedik mindegyik cipőbe tökéletesen. Ha kérdése van, keresse fel kollégáinkat a mérési ponton.

Az első napokban csak 1-2 órán át használja, majd 2-4 hét alatt fokozatosan növelje a használat idejét a megszokásig.

Mosógépben nem mosható!

Amennyiben elázik a betét, azt a cipőből kivéve alaposan meg kell szárítani! (fűtőtesten vagy hajszárítóval nem szabad)

Új cipő vásárlásakor betéttel együtt érdemes próbálni.

Nem alkalmazható szélsőséges körülmények között, olyan munkahelyen, ahol a betétet és a cipőt vízben vagy sáros közegben, vagy vegyszerrel szennyezett környezetben használják.

Tisztítása: kéz között mosva, 30°C-os vízben.

A forgalomban kapható láb spray-k és szagtalanítók használata engedélyezett.

Használat során a talpbetét felveszi a cipő és talp alakját, így az eredeti állapothoz képest eltérhet a kinézete, de ez természetes.